

BIOANALYSE DETERMINE™ VIH-1/VIH-2 D'ABBOTT

Français

(Refer to package inserts for assay procedures.)



PROCÉDURE POUR SANG TOTAL



PROCÉDURE POUR SÉRUM/PLASMA

- Cliquez sur le bouton approprié pour continuer -

BIOANALYSE DETERMINE™ VIH-1/VIH-2 D'ABBOTT

PROCÉDURE POUR SANG TOTAL

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

1. Détachez la bandelette d'analyse.

NUMÉRO DE LOT →

Note: l'enlèvement des bandelettes devrait commencer du côté droit de la carte d'analyse pour préserver le numéro de lot qui figure sur le côté gauche de la carte.




Le système BIOANALYSE Determine™ VIH-1/VIH-2 n'est pas disponible aux États-Unis.

PROCÉDURE POUR SANG TOTAL

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

2. Retirez l'enveloppe

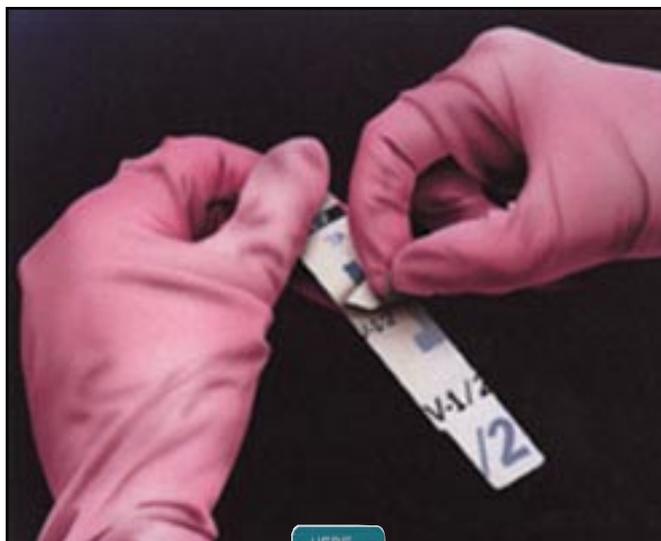

Description de la bandelette d'analyse



- Endroit pour écrire l'identification du patient
- Nom de l'analyse
- No. d'identification de l'analyse

— Lire les résultats de contrôle ici

— Lire les résultats du patient ici

— Ajouter le prélèvement ici

PROCÉDURE POUR SANG TOTAL

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

3. Ajoutez 50 µl de prélèvement



Méthode de prélèvement de sang
capillaire au bout du doigt

Prélèvement de sang
capillaire au bout du doigt



PROCÉDURE POUR SANG TOTAL

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

4. Ajoutez une goutte de solution-tampon



5. Attendez


15 minutes



PROCÉDURE POUR SANG TOTAL

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

6. Lisez les résultats

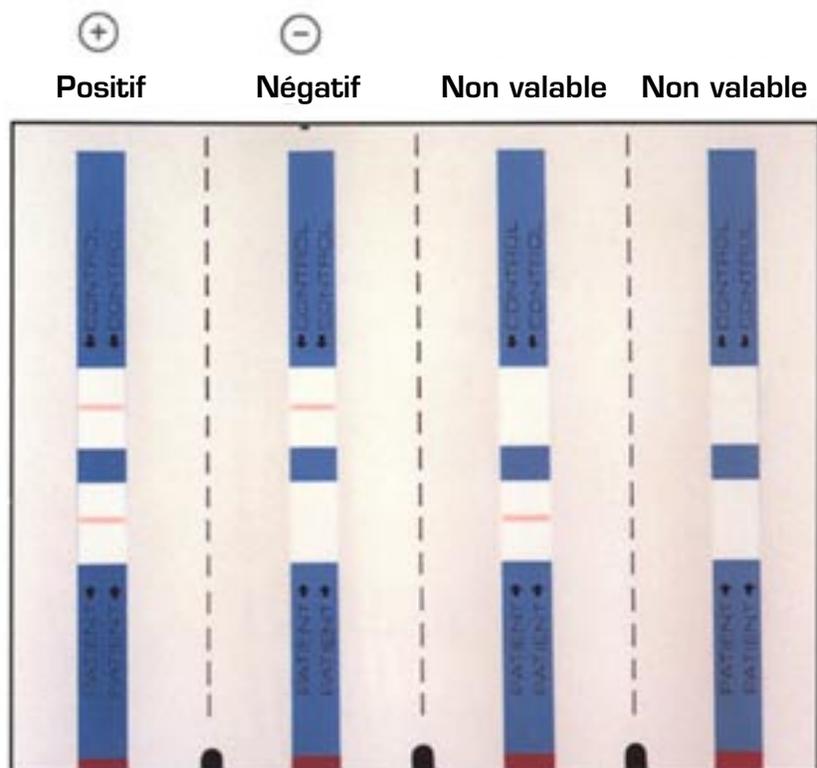

Pour être interprétable, il doit y avoir une barre dans la fenêtre de contrôle.

BIOANALYSE DETERMINE™ VIH-1/VIH-2 D'ABBOTT

PROCÉDURE POUR SÉRUM/PLASMA

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

1. Détachez la bandelette d'analyse.

NUMÉRO DE LOT →

Note: l'enlèvement des bandelettes devrait commencer du côté droit de la carte d'analyse pour préserver le numéro de lot qui figure sur le côté gauche de la carte.




Le système BIOANALYSE Determine™ VIH-1/VIH-2 n'est pas disponible aux États-Unis.

PROCÉDURE POUR SÉRUM/PLASMA

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

2. Retirez l'enveloppe

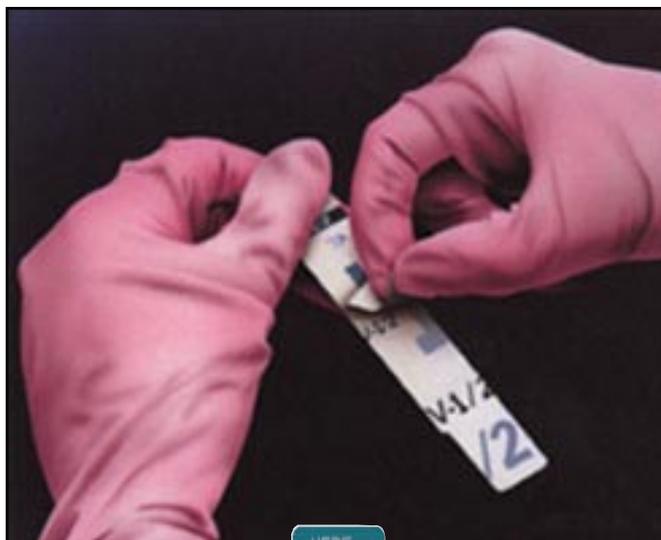

Description de la bandelette d'analyse



- Endroit pour écrire l'identification du patient
- Nom de l'analyse
- No. d'identification de l'analyse

- Lire les résultats de contrôle ici
- Lire les résultats du patient ici
- Ajouter le prélèvement ici

PROCÉDURE POUR SÉRUM/PLASMA

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

3. Ajoutez le prélèvement 50 µl d'échantillon



PROCÉDURE POUR SÉRUM/PLASMA

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

4. Attendez


15 minutes



PROCÉDURE POUR SÉRUM/PLASMA

(Se référer aux insertions dans le carton pour les procédures d'essai.)

5. Lisez les résultats

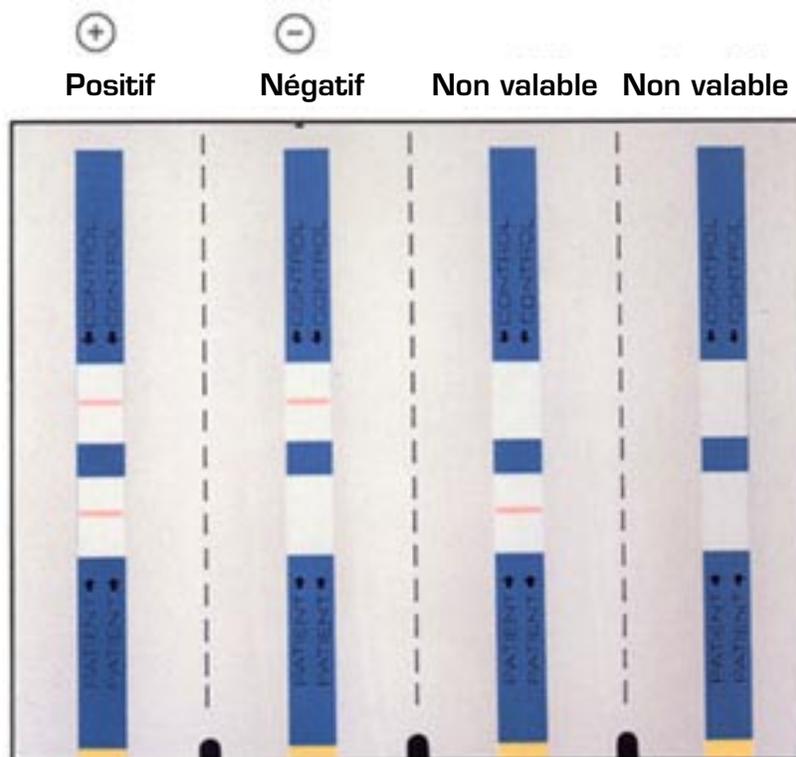

Pour être interprétable, il doit y avoir une barre dans la fenêtre de contrôle.

Determine™

Simple et précis.

ABBOTT DIAGNOSTICS

Une division de ABBOTT LABORATORIES, INC.

ABBOTT PARK, ILLINOIS 60064 USA

